



Kit Curatif Paludisme

Médicament antipaludique 2

Ce kit est destiné à diagnostiquer et traiter rapidement une crise de paludisme pour éviter d'en mourir. Il doit être gardé en permanence à portée de main lorsque l'on a été exposé à cette maladie. Il sera particulièrement utile au retour de zone impaludée, lorsqu'un voyageur se retrouve dans un pays où le paludisme est méconnu.

Ed. 2010
HKP006F



DIAGNOSTIC

Composition

- 1 thermomètre frontal avec son boîtier
- 3 lancettes sécurité en plastique
- 3 tests de diagnostic rapide du paludisme falciparum :
 - 3 bandelettes immunoquick
 - 3 tubes de réactif
- 3 compresses désinfectantes
- 1 boîte en fer blanc (153 x 96 x 35 mm)
- 1 livret explicatif détaillé

Utilisation du test de diagnostic rapide

1. Prenez une lancette par ses côtés
2. Tournez l'embout mobile bleu pour le dégager
3. Désinfectez soigneusement le bout du doigt
4. Appliquez la sortie de l'aiguille sur le doigt
5. Appuyez sur la gâchette (piqûre indolore)
6. Appuyez sur le doigt pour aider à faire perler une goutte de sang
7. Appliquez sur la goutte de sang l'extrémité buvard de la bandelette
8. Plongez la bandelette dans le tube
9. Après 5 à 15 minutes lisez le résultat.

TRAITEMENT

Composition

- 1 boîte de traitement complet pour une crise de paludisme (12 comprimés)

Utilisation du médicament

1. Prendre 4 comprimés de ce médicament avec un repas ou une boisson lactée pour favoriser l'absorption, suivant les conditions du livret explicatif.
2. Prendre à nouveau 4 comprimés le lendemain à la même heure que la première prise.
3. Enfin prendre encore 4 comprimés le surlendemain à la même heure.

Même si vous vous sentez mieux, n'arrêtez pas le traitement avant d'avoir pris 12 comprimés sur 3 jours.

Autant que possible, utilisez votre KIT CURATIF PALUDISME avec un médecin. Si vous ne pouvez pas consulter rapidement (dans les 6 heures qui suivent le début des symptômes), vous pouvez faire vous-même le test diagnostique du paludisme, de préférence avec l'aide d'une personne de votre entourage.



www.smi-health.com

Solutions For Your Good Health